

## CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN

### HHP Andumedic-3 andullatie therapiematras / contra-indicaties:

- Kies de verwarmingsstand al naargelang de gevoeligheid en het huidtype.
- Vermijd oogcontact met de infraroodbron en andere gevoelige lichaamsdelen.
- Personen die onder medische behandeling zijn of die lijden aan ontstekingen, zwellingen of uitslag moeten vóór het gebruik van infraroodwarmte hun arts raadplegen.
- **Fybromyalgie** patiënten en personen met overeenkomstige aandoeningen uitsluitend op een lage vibratie-intensiteit behandelen, MAX STAND 2, daar anders de pijnklachten niet verminderen maar juist verergeren.
- Patiënten met (ernstige) rugklachten moeten na afloop van het behandelprogramma eerst op hun zij gaan liggen en daarna pas met het bovenlichaam omhoog komen daar anders teveel drukbelasting op de rug(gewervel/-kolom) komt te staan, wat negatieve gevolgen heeft op het behandelingseffect.



### **BELANGRIJK:**

- 1 uur voor aanvang van de Andullatie-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken
- Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een glas water drinken.

## CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN

### BEMER Pro-set fysische vasculaire therapiematras / contra-indicaties:

Géén Bemer-behandeling bij:

- immunosuppressieve therapie na een transplantatie.
- immunosuppressieve therapie na een allogene celtransplantatie.

Bemer-behandeling mag wel toegepast worden bij auto-immuunziekten of dermatologische aandoeningen.

Bij de volgende aandoeningen vooraf aan de Bemer-behandeling eerst de arts/behandelaar raadplegen:

- Koorts met een onduidelijke oorzaak
- Infectieziekten, ontstekingen
- Ernstige hartritmestoornissen
- Ernstige psychoses
- Aandoeningen waarbij ongecontroleerde attaques optreden (bijvoorbeeld epilepsie).
- Langdurig gebruik van  $\beta$ -receptor antgonisten
- Langdurig gebruik van corticoïden (bijvoorbeeld Predniso(lo)n: onderdrukken immuunsysteem, ontstekingsremmers, bij behandeling van kanker)
- Langdurig gebruik van cumarinederivaten (bloedverdunners)

De **B.Pad** mag over het hoofd gedrapeerd en gebruikt worden mits de intensiteit NIET HOGER DAN **STAND 2** wordt ingesteld in verband met risico van oorsuizen.

De behandeling van de **B.Body** matras beginnen met intensiteitsstand 6 à 7 of programmastand nummer 2 (middenstand).



**BEMER**



**OLAC – Organic Lifestyle Advice Center**

*Ohmweg 57G – 2952 BD Alblasterdam*

Tel: 078-3036468 / E-mail: info@ortho-hormoonfactorpraktijk.com

Ortho-hormoonfactorpraktijk: BTW-nr. NL014804918B01 / KvK-nr.: 7122 4211

## CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN

### **BEMER Pro-set fysische vasculaire therapie / contra-indicaties:**

#### **BELANGRIJK:**

- 1 uur voor aanvang van de BEMER-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken
- Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een glas water drinken.

## CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN

### MEDISANA PR-M90 Shiatsu-acupressuur massagestoel / contra-indicaties:

Geén Shiatsu-massage bij:

- Koorts, met onduidelijke oorzaak
- Griep
- Infectieziekten, ontstekingen
- Ernstige vaatziekten
- Trombose, fibromyalgie
- Eerste 3 maanden van de zwangerschap (na derde maand wél aanbevolen)
- Open wonden
- Nog niet geheelde littekens na een operatie
- Ziekten met een verhoogde stofwisseling
- Alcohol- en/of drugsverslaving
- Traumatische aandoeningen
- Psoriasis
- Ernstige neklachten (betreft: nekmassage)



### **BELANGRIJK:**

- 1 uur voor aanvang van de Shiatsu-behandeling NIET ROKEN, GEEN koffie of zwarte thee drinken
- Voor start van de behandeling 1 glas water drinken en na afloop van de behandeling nogmaals een glas water drinken.

## CONTRA-INDICATIES VOOR BEHANDELINGEN

### **TANITA – BC-601 body composition monitor / contra-indicaties:**

Mensen met een elektronisch medisch implantaat zoals bijvoorbeeld een pacemaker, mogen niet de lichaamssamentellings-meting doen. De monitor stuurt namelijk een zwak elektrisch signaal door het lichaam dat de werking van implantaten kan verstoren.

Zwangere vrouwen dienen alleen de gewicht-meetfunctie te gebruiken. Alle andere functies zijn niet bedoeld voor zwangere vrouwen.

Gebruik de weegschaal niet onmiddellijk na een bad of na zware inspanningen. Het oppervlak van de weegschaal zal glad zijn wanneer het nat is.

